



Kapillarblutentnahme für den Nachweis von Phosphatidylethanol (PEth)

Das Labor, das für uns die PETH Bestimmung im Kapillarblut durchführt, hat auf ein neues Blutentnahmesystem umgestellt. Proben auf Trockenblutkarte (DBS, z.B. Capitainer qDBS) und Dried Blood Drops (DBD) werden weiterhin analysiert, jedoch wird uns dieses Abnahmesystem nicht mehr vom Labor zur Verfügung gestellt.

Neu: Mikrogefäß statt Trockenblutkarte
bei Kapillarblut: Kapillarblutentnahme mit 20 µl Glaskapillare:

Je Probe wird benötigt:

- **1 Lanzette**
- **1 Glaskapillare**
- **1 Probengefäß für Kapillarblut**

Die oben genannten Produkte werden als Set für 50 Probennahmen verteilt und sind zum einmaligen Gebrauch bestimmt.

Zusätzlich benötigt man:

- **Kapillarhalter (zum mehrmaligen Gebrauch)**

Als Anlage finden Sie die vollständige Bedienungsanleitung.

Für Fragen stehen wir unter 040 / 53805-804 gerne zur Verfügung.